


Montage facile
de la visière **S1**, à faire
par l'utilisateur final,
sans outils



Protégez-vous!

en polyéthylène recyclable

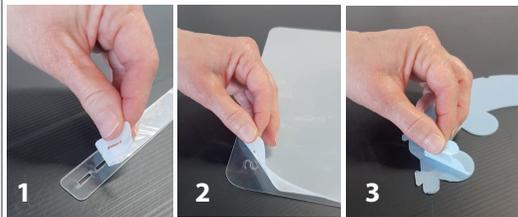


Retirer les films protecteurs
sur les 2 faces de chacune des pièces



Plier vers le haut
les 4 demi-lunes
du support frontal
se repérer avec le repère 2

Langquette

Ergot

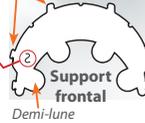


Haut

Visière

S

Bas

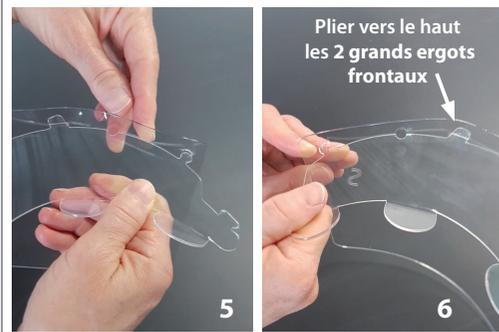


Clipser la visière sur les 4 ergots
du support frontal



7 Régler votre tour
de tête en ajustant
la languette à droite

IMPORTANT

Ces outils de protection, en polyéthylène (PETg), recyclable, viennent en complément des équipements de protection obligatoires imposés par l'Etat aux employeurs et travailleurs dans le cadre de la lutte contre l'épidémie sanitaire (masques, gel hydro-alcoolique...). Ils n'exemptent pas l'employeur du strict respect des mesures barrières de prévention et de protection de ses salariés. Ils complètent toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé de son personnel (notamment prévention, formation, fourniture d'équipements de travail et de protection adaptés...). Ces produits sont destinés à une utilisation complémentaire de prévention des risques, ils ne peuvent en aucun cas être reconnus comme équipement ayant une garantie de résultat.

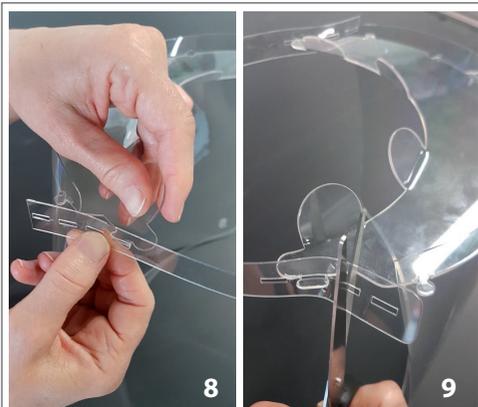

Ajuster la languette à gauche...
et Couper le surplus de la languette



Plier à la main les bords
inférieurs de la visière



Coller le porte-étiquette
sur le support frontal

EN OPTION